

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 52995 // PROTECTASEPT FX PLUS

Typ:	Flächendesinfektion, Neutral
Inhalt:	5 l
Verpackungseinheit:	1 Stück



### Beschreibung

Gebrauchsfertige alkoholfreie Schnelldesinfektion zur Desinfektion von Flächen aller Art, Duftnote: Neutral, alkohol-, aldehyd-, tensid- und phenolfrei, VAH-konform getestet, Dermatest: sehr gut, kein Gefahrgut / -stoff, nicht kennzeichnungspflichtig, nicht brennbar, voll viruzid, 100% biologisch abbaubar, umfassendes Wirkungsspektrum innerhalb 1 Minute

### Allgemeine Hinweise

Die Hygiene dient im gesamten (medizinischen) Betrieb der Vorbeugung von Infektionen bei Patienten und Mitarbeitern. Um hohe medizinische Standards gewährleisten zu können, ist eine sorgfältige und gründliche Hygiene in Praxen, Krankenhäusern etc. unerlässlich. Gesetzlich festgelegt sind nach einem festgelegten Zeitschema vorgenommene Anwendungen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Ziel ist die Eliminierung infektionsrelevanter Keime mit standardisiertem, quantifizierbarem Wirkungsnachweis zur Vorbeugung nosokomialer Infektionen. Die Flächendesinfektionsmittel werden sowohl für die routinemäßige Desinfektion als „prophylaktische Desinfektion“ als auch zur gezielten Desinfektion bei sichtbar kontaminierten Flächen bzw. Flächen oder Gegenstände, die kontaminiert sein könnten, eingesetzt. Unter arbeitsorganisatorischen Aspekten spielen Einwirkzeiten eine wichtige Rolle. Flächen die, bei rasch aufeinander folgenden Eingriffen am Patienten zu Infektionsquellen werden können, sollten mit schnell wirkenden Verfahren desinfiziert werden.

### Anwendungsgebiet

Gebrauchsfertiges Sprüh- und Wischdesinfektionsmittel mit dem neuartigen, wasserbasierenden Wirkstoff NEUTRAL+ION®. **Frei von Alkohol, Aldehyden, Tensiden und Phenolen** und besonders mild.

### Anwendungshinweise

Die gebrauchsfertige Schnelldesinfektion wird aus ca. 30 cm Abstand auf Flächen aller Art aufgebracht. Alternativ kann die Lösung auch direkt auf ein flusenfreies, ungefärbtes Einmaltuch aufgebracht werden. Es ist darauf zu achten, dass die zu desinfizierenden Flächen vollständig benetzt sind. Danach kurz einwirken lassen und bei Bedarf mit einem flusenfreien, ungefärbtem Einmaltuch überschüssige Präparatmenge entfernen. Materialverträglichkeit an verdeckter Stelle prüfen.

**Kreissparkasse Köln**  
IBAN: DE49 3705 0299 0127 2721 64  
BIC: COKSDE33XXX

**Sparkasse Köln/Bonn**  
IBAN: DE32 3705 0198 1933 3245 90  
BIC: COLSDE33XXX

**HypoVereinsbank**  
IBAN: DE63 3702 0090 0027 7497 39  
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter [www.nitras.de](http://www.nitras.de) oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at [www.nitras.de](http://www.nitras.de) or on request).

## Zusammensetzung

In 100 ml enthalten: > 0,12 g Natriumhypochlorit

## Einwirkzeiten

Bakterizid	EN13727:2015 (5 Min.) EN13697:2015 (5 Min.)
Levurozid:	EN13697:2015 (5 Min.)
Mykobakterizid:	EN14348:2005 (5 Min.)
Sporizid:	FprEN17126:2018 (1 Min.)
Fungizid:	EN13624:2013 (15 Min.)
Viruzid:	EN14476:2013 (1 Min.) prEN16777:2016 (15 Min.)

## Lieferform Gebinde

Hochwertige Verpackungslösungen nach Kundenwunsch.

## Sicherheitshinweise

Biozid sicher und vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch beiliegendes Sicherheitsdatenblatt lesen! Bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## Gutachten

Unsere Produkte sind nach neuesten Methoden wissenschaftlich untersucht und getestet.

## Gemeldetes Biozid-Produkt

Handelsname: Nitras Protectasept Neutralion  
Registriernummer: N-75621  
Meldedatum: 21.02.2018  
Maximale Verkehrsfähigkeit (ChemBiozidMeldeV): 31.12.2024  
Artikelnummer: 52995

### Kreissparkasse Köln

IBAN: DE49 3705 0299 0127 2721 64  
BIC: COKSDE33XXX

### Sparkasse Köln/Bonn

IBAN: DE32 3705 0198 1933 3245 90  
BIC: COLSDE33XXX

### HypoVereinsbank

IBAN: DE63 3702 0090 0027 7497 39  
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter [www.nitras.de](http://www.nitras.de) oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at [www.nitras.de](http://www.nitras.de) or on request).