

TECHNISCHES DATENBLATT

51401 // PROTECTASEPT

Typ:	Flächendesinfektion, Konzentrat
Inhalt:	1 l
Verpackungseinheit:	26 Stück



Beschreibung

Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion von Flächen aller Art, z. B. Fußböden, Wände, Inventar und Geräte (nicht invasive Medizinprodukte), besonders geeignet zur Desinfektion von alkoholempfindlichen Oberflächen wie Acrylglas, alkoholfrei, aldehydfrei, IHO-gelistet, umfassendes Wirkungsspektrum bei geringer Anwendungskonzentration, hinterlässt nach der Anwendung einen angenehm frischen Geruch nach Zitrone, zugelassen als Medizinprodukt Klasse IIa, 1 l Dosierflasche, Vertrieb gemäß Biozidprodukterichtlinie nur in Deutschland

Eigenschaften

Konzentrat zur Desinfektion von Oberflächen und Fussböden, sehr niedrige Anwendungskonzentrationen, besonders mild zu allen Oberflächen bei sehr guter Reinigungsleistung

Präparate-Typ

Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion von Oberflächen. Bei geringen Anwendungskonzentrationen wird ein umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren abgedeckt.

Anwendungsbereiche

Gemäß MPG: Flächendesinfektionsmittel zur prophylaktischen oberflächendesinfektion von Medizinprodukten. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Gemäß Biozid-Verordnung: Aldehydfreies Flächenkonzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen.

Anwendung

Das Desinfektionsmittelkonzentrat wird vor seiner Anwendung zuerst mit Leitungswasser verdünnt. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen! Vor großflächigen Anwendungen auf empfindlichen Materialien wie Kunstleder erst an einer kleinen verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Um Schlierenbildung zu vermeiden, sollten die behandelten Flächen in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten (Wasser) Einmaltuch nachgewischt werden.

Kreissparkasse Köln
IBAN: DE49 3705 0299 0127 2721 64
BIC: COKSDE33XXX

Sparkasse Köln/Bonn
IBAN: DE32 3705 0198 1933 3245 90
BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank
IBAN: DE63 3702 0090 0027 7497 39
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).

Zusammensetzung

In 100g Konzentrat: 5,6g Didecylmethyl-ammoniumchlorid; 3,1g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin
Kennzeichnung gemäß V0648/2004/EG: < 5 % nichtionische Tenside, 5-15% kationische Tenside

Chemisch-Physikalische-Daten

Dichte: 1,00g/ml
pH-Wert: 9,35 ±0,15

Einwirkzeiten**Bakterien und Candida albicans nach EN 13727, EN 13624, EN 13697 (hohe Belastung):**

0,5% 15min.

Bakterien und Candida albicans, EN 16615 (hohe Belastung):

3,0% 15min.
1,0% 60min.

Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach DVV/RKI (hohe Belastung):

2,0% 5min.
1,0% 60min.

TbB (M. terrae) nach EN 14348 (niedrige Belastung):

1,0% 60min.

Sicherheitshinweise

H 302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H 314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H 410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. Enthält Didecylmethylammoniumchlorid, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 01 entsorgen.

**GEFAHR****Vertrieb**

Vertrieb gemäß Biozidprodukterichtlinie nur in Deutschland

Kreissparkasse Köln
IBAN: DE49 3705 0299 0127 2721 64
BIC: COKSDE33XXX

Sparkasse Köln/Bonn
IBAN: DE32 3705 0198 1933 3245 90
BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank
IBAN: DE63 3702 0090 0027 7497 39
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).

Dosiertabelle

Liter Lösung	0,25 %	0,5 %	1,0 %	1,5 %	2,0 %	3,0 %	4,0 %
1 Liter	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml
2 Liter	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml
3 Liter	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml
4 Liter	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml
5 Liter	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE49 3705 0299 0127 2721 64
BIC: COKSDE33XXX

Sparkasse Köln/Bonn

IBAN: DE32 3705 0198 1933 3245 90
BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank

IBAN: DE63 3702 0090 0027 7497 39
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).